

Gebrauchsanweisung

HELIOFORM® - HF Abdecklack LC, lichthärtend

Indikation

HF-Abdecklack LC ist ein gebrauchsfertiger lichthärtender Lack, der in geeigneten Lichthärtegeräten aushärtet. Das Material ist zum Abdecken von Metallteilen bei der direkten Galvanotechnik und von Silberleitlacküberschüssen in der Airbrush- und Pinseltechnik indiziert.

Anwendung

Der Lack wird aufgeschüttelt und dann mit dem im Deckel integrierten Pinsel oder einem anderen Instrument aufgetragen.

Aushärtezeit

Ca. 20 Sekunden bei 600 mW/cm², 400 - 500 nm Wellenlänge.

Geräteempfehlung

Wir empfehlen das C. HAFNER metalight mini Lichthärtegerät (15 min.).

Mit dem „Alpha-Lichthärtegerät“ von Espe wird eine Aushärtezeit mindestens 30 Sekunden (entspricht 6 Zyklen sehr dicht am Objekt) empfohlen. Im Kulzer XS sind 180 Sekunden ausreichend (Kupferelektroden müssen im XS abgebogen werden, damit sie ins Gerät passen).

Bei anderen Lichthärtegeräten ist entsprechend deren Leistung die Aushärtezeit anzupassen. Eine optische Kontrolle durch das „Aufschneiden“ eines dicken, ausgehärteten Tropfens des Lackes wird empfohlen.

Scharfe Kanten und Grate müssen ggf. nachlackiert werden.

Da der HF Abdecklack LC den Silberleitlack nicht anlässt, kann die Leitspur komplett abgedeckt werden, was die Ausarbeitung des Helioformteils erleichtert und beschleunigt.

Lagerbestimmungen

Behälter dicht geschlossen und dunkel aufbewahren. Kühl und trocken lagern.

Warnhinweise

Das Material ist reizend und leicht entzündlich. Dämpfe nicht einatmen und Berührung mit der Haut vermeiden.

Lieferform

Art.Nr. 6558 HF Abdecklack LC, lichthärtend 10 ml

BESTELLTELEFON:
0 7044 - 90333 333

GHAFNER 
Edelmetall · Technologie

C. HAFNER GmbH + Co.KG
Gold- und Silberscheideansalt
Maybachstrasse 4
71299 Wimsheim
Tel.: (07044) 90333-333
Fax: (07044) 90334-333
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de