

Gebrauchsanweisung

HELIOFORM® - HF Modellkunststoff Komponente A+B

Indikation

Der HELIOFORM® HF Modellkunststoff auf Polyurethan-Basis ist zur Herstellung von Dublikatstümpfen und zum Auffüllen von Primärteilen in der Galvanotechnik geeignet. Das Material ist in seiner Zusammensetzung perfekt auf die anderen Komponenten des HELIOFORM® - Systems abgestimmt.

Achtung: Hydrokolloid- und Polyätherformen können nicht mit dem HF Modellkunststoff ausgegossen werden!

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln! Der HF Modellkunststoff Komponente A + B wird exakt im Verhältnis 1:1 (gewichtsbezogen) dosiert. Die zum Abwiegen verwendete Waage muss eine Genauigkeit von 0,1 g aufweisen.

Beide Komponenten mit geeignetem Instrument 30 sec lang zügig durchrühren, bis ein schlierenfreies Aussehen erreicht ist und die Masse homogen grau erscheint. Die Verarbeitungszeit beträgt insgesamt ca. 5 min.

Den Kunststoff anschließend unter Zuhilfenahme eines kleinen Spatels in die Dublikatform einbringen und mit dünnem Strahl auffüllen.

Die gefüllte Dublierform sofort in einen Drucktopf stellen und ohne Wasser 30 min bei ca. 2 bar aushärten.

Der Drucktopf muss absolut trocken sein!

Aufgefüllte Primärteile müssen nicht im Drucktopf ausgehärtet werden.

Die Dublikate aus der Silikonform entfernen. Vor dem Weiterverarbeiten mit mindestens 96 % Ethanol oder Isopropanol entfetten.

Lagerbestimmungen

Kunststoff bei Raumtemperatur gut verschlossen und nicht über 30 °C lagern. Eine kühlere Lagerung erhöht die Verarbeitungszeit. Haltbarkeit: 6 Monate.

Hinweise

Vor Gebrauch gut schütteln, besonders die schwarz eingefärbte Komponente A. Flaschen nach Gebrauch nicht offen stehen lassen.

Lieferformen

Art.Nr. 6051	HF Modellkunststoff, Komponente A 250 ml
Art.Nr. 6052	HF Modellkunststoff, Komponente B 250 ml
Art.Nr. 6090	HF Modellkunststoff, Komponente A 100 ml
Art.Nr. 6089	HF Modellkunststoff, Komponente B 100 ml



**BESTELLTELEFON:
0 7044 - 90333 333**

G HAFNER 
Edelmetall · Technologie

C. HAFNER GmbH + Co.KG
Gold- und Silberscheideansalt
Maybachstrasse 4
71299 Wimsheim
Tel.: (07044) 90333-333
Fax: (07044) 90334-333
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de