

Gebrauchsanweisung

HELIOFORM[®] H - Elektrolyt und Goldkonzentrat

Indikation

Das Goldbad HELIOFORM[®] H ist eine gebrauchsfertige nichtcyanidische Goldsulfidlösung zur Herstellung von galvanisch abgeschiedenen Gerüsten. HELIOFORM[®] Bäder sind ausschließlich für den Einsatz in HELIOFORM[®] Galvanoforming-Geräten geeignet.

- Gerüste für Doppelkronen bei festsitzender / abnehmbarer Prothetik verklebt mit Tertiärstrukturen
- Überkonstruktionen auf Stegen und Kronen, verklebt mit Tertiärstrukturen
- Wiederherstellung von Friktion bei Doppelkronen und Stegen

Kontraindikationen

- Vollgoldrestaurationen
- Bruxismus
- Unzureichende Platzverhältnisse zum Antagonisten
- Tangentiale Präparationen
- Kupferhaltige Primärstrukturen (Teleskopkronen, Konuskronen, Stege)
- Provisorische Befestigung im Mund
- Alle weiteren Anwendungen, die nicht als Indikation aufgeführt sind

Nebenwirkungen

Bei bekannter Allergie auf einen der Inhaltsstoffe muss auf eine Verwendung von Helioform Restaurationen verzichtet werden.

Wechselwirkungen

Verschiedene Legierungstypen in derselben Mundhöhle können zu galvanischen Reaktionen führen. Kupferhaltige Primärkronen können bei HELIOFORM Doppelkronen zur Verfärbung auf der Innenfläche führen.

Anwendung

Das HELIOFORM[®] Verfahren arbeitet mit nichtcyanidischen Goldsulfid-Bädern. Eine Verschmutzung der Bäder ist zu vermeiden.

Wenn die dem System vorgegebene Menge Konzentrat durch das Bad gearbeitet wurde, ist der Elektrolyt verbraucht und muss gewechselt werden! Der Zeitpunkt wird durch die entsprechende Displayanzeige am Gerät mitgeteilt.

Originalbäder sind zusätzlich mit einer Schutzhülle versehen. Diese erst unmittelbar vor Gebrauch des Bades entfernen.

Wenn ein Objekt ins Bad gefallen ist, niemals mit bloßen Händen in den Elektrolyt fassen und immer eine saubere Kunststoffpinzette verwenden, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Lagerbestimmungen

Trocken aufbewahren
Lagertemperatur 5 °C - 30 °C

Warnhinweise

Die Anwendung darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte beachten Sie, dass das Inhalieren und Verschlucken der Flüssigkeiten zu vermeiden ist.
Schutzhandschuhe und dichtschießende Schutzbrille sind beim Umfüllen unbedingt zu verwenden.
Elektrolyte / Konzentrate, die während des Gebrauchs das Verfallsdatum erreichen, müssen gegen neue Produkte ausgetauscht werden. Elektrolyte / Konzentrate, die während des Gebrauchs Ausfällungen oder Trübungen zeigen, müssen gegen neue Produkte ausgetauscht werden. Eine Befüllung des Gerätes mit Elektrolyt / Konzentrat deren Verfallsdatum erreicht ist, ist nicht zulässig.
Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsdatenblätter.

Lieferformen

Art.Nr. 7837 HELIOFORM® H Elektrolyt 3 L für HF 700 24 g Au
Art.Nr. 7836 HELIOFORM® H Konzentrat 275 ml für HF 700 25 g Au

BESTELLTELEFON:
+49 7044 90333-333

CE0483



C. HAFNER GmbH + Co.KG
Gold-und Silberscheideanstalt
Maybachstraße 4
71299 Wimsheim
Tel.: +49 7044 90333-0
Fax: +49 7044 90334-0
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de