

HELIOFORM® - HF-Silberleitlack und HF-Pinselreiniger

Indikation

Der HF-Silberleitlack ist für die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Kontaktschicht auf den zu galvanisierenden Objekten notwendig. Der HF-Pinselreiniger dient zur Reinigung des Lackierpinsels nach der Benutzung.

Verarbeitungsanleitung

Der HF-Silberleitlack ist vor der Benutzung gut zu schütteln, bis die integrierte Mischkugel mindestens eine Minute gut zu hören ist. Die zu galvanisierenden Teile müssen sauber, staubfrei, trocken und fettfrei sein. Der HF-Silberleitlack wird in einer dünnen Schicht gleichmäßig und deckend aufgetragen. Eventuelles Nachlackieren von Fehlstellen erst vornehmen, wenn die erste Schicht schon angetrocknet ist (nach ca. 5 min.) Die Silberleitlackverbindung zur Kupferelektrode sollte mindestens 2 mm breit sein. Freiliegender Kupferanteil der Elektrode bis zum Schrumpfschlauch ebenfalls mit Silberleitlack bepinseln. Zur Reinigung des Pinsels etwas HF-Pinselreiniger verwenden.

Achtung:

Vor dem Galvanisieren muss der HF-Silberleitlack mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur trocknen. Es kann sonst zu Verunreinigungen des Goldbades kommen und das Abscheideresultat negativ beeinflussen.

Schutzmaßnahmen:

Der HF-Silberleitlack kann zu Verunreinigungen auf Arbeitsflächen und Kleidung führen. Um dies zu vermeiden, sollte im Vorfeld für entsprechenden Schutz gesorgt werden. Die Berührung von HF-Silberleitlack und HF-Pinselreiniger mit der Haut sollte vermieden werden.

Lagerbestimmungen

Behälter dicht geschlossen halten und stehend lagern, um ein eventuelles Auslaufen zu vermeiden.

Gefahrenhinweise:

Silberleitlack und Pinselreiniger sind leicht entzündlich.

Warnhinweise

Die Anwendung darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass das Inhalieren und Verschlucken der Flüssigkeiten zu vermeiden ist. Schutzhandschuhe und dichtschießende Schutzbrille sind beim Umfüllen unbedingt zu verwenden.

Lieferformen

Art.Nr. 2134	HF Silber-Leitlack classic	5 g
Art.Nr. 6231	HF Silber-Leitlack	5 g
Art.Nr. 6232	HF Pinselreiniger	30 ml

BESTELLTELEFON:
0 7044 - 90333 333

G HAFNER 
Edelmetall • Technologie

C. HAFNER GmbH + Co.KG
Gold- und Silberscheideansalt
Maybachstrasse 4
71299 Wimsheim
Tel.: (07044) 90333-333
Fax: (07044) 90334-333
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de